

PRESSMATIC®



PRESSMATIC PM-20000DBT (DIGITAL/BLANKET/TOWER)

8 000 zł

PRESSMATIC®

Opis



ZESTAW PRESSMATIC PM-20000DBT Z MANKIETAMI, ELEKTRODAMI I MATĄ

PRESSMATIC PM-20000DBT z serii Professional to **zaawansowany aparat do presoterapii 3w1**.

Urządzenie posiada dużą, stabilną obudowę wyposażoną w zamkniętą przestrzeń do przechowywania akcesoriów. Dzięki kółkom urządzenie jest mobilne i wygodne w codziennym użytkowaniu. Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w

kluczyk i przycisk dla bezpieczeństwa. Przeznaczony jest głównie do użytku profesjonalnego przez kosmetologów, masażyстів i fizjoterapeutów. Posiada **cyfrowy układ sterowania**, co gwarantuje bardzo precyzyjny dobór parametrów masażu. Urządzenie posiada komplet dedykowanych mankietów na tułów, ręce, uda oraz łydki i stopy. Aparat do presoterapii PRESSMATIC PM-20000DBT posiada **8 różnych trybów** presoterapii przeznaczonych do łagodzenia obrzęku limfatycznego, wyszczuplania, usuwania cellulitu, a także aktywacji lub regeneracji mięśni. Umożliwia przeprowadzanie **termoterapii FIR**, która ma zastosowanie w zabiegach wyszczuplających i odmładzających, a także wspomaga krążenie krwi i rozluźnia mięśnie. Ponadto posiada funkcję **elektrostymulacji EMS**, wzmacniającą mięśnie, przyspieszającą metabolizm oraz wspomagającą wyszczuplanie i jędrność skóry.

Opis

PRESSMATIC®

MANKIETY W ZESTAWIE:


- 2 mankiety 2 komorowe na ręce (maksymalny obwód 61 cm)
- 1 mankiet 4 komorowy na tułów (maksymalny obwód 116 cm)
- 2 mankiety 4 komorowe na uda (maksymalny obwód 87 cm)
- 2 mankiety 2 komorowe na łydki i stopy (maksymalny obwód 41 cm)



Opis

ELEKTRODY W ZESTWIE:

- 5 par elektrod silikonowych o śr. 6cm (np. na ramiona, łydki)
- 5 par elektrod silikonowych o śr. 9cm (np. na tułów, uda, łydki)

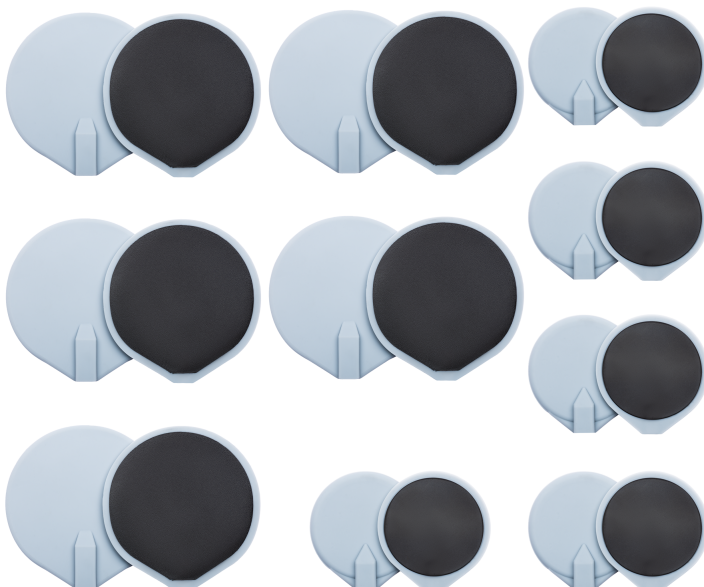


Opis

PASY W ZESTWIE:

- 4 pasy do elektrod o długości 28

PRESSMATIC®

- cm (np. na ramiona, łydki)
- 4 pasy do elektrod o długości 40 cm (np. na uda, łydki)
- 2 pasy do elektrod o długości 51 cm (np. na uda, łydki)

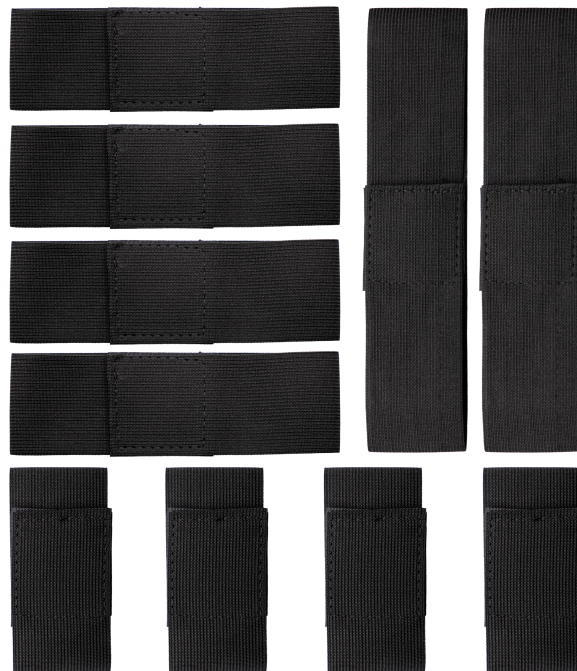

Opis



Nowoczesny, zaawansowany model do użytku profesjonalnego.



3 w 1: presoterapia, elektrostymulacja i termoterapia FIR



Czytelny, sterowany cyfrowo panel dotykowy sprawia, że obsługa urządzenia jest bardzo intuicyjna.



8 różnych programów służących m.in. do drenażu limfatycznego, detoksykacji, treningu mięśni i ujędrniania



Cicha, wydajna pompa generująca ciśnienie w zakresie od 30 do 294 mmHg



Termoterapia FIR działa wyszczuplająco, wspomaga krążenie krwi i rozluźnia mięśnie.



Elektrostymulacja EMS wzmacnia mięśnie, przyspiesza metabolizm oraz wspomaga wyszczuplanie i jędrność skóry.



Mata na łóżko, w której ukryte są przewody, a w jej kieszeniach można schować mankiety i elektrody.

Opis

PM-2000DBT - DLA KOGO POLECANY?

Urządzenie do presoterapii

PRESSMATIC®



PRESSMATIC PM-20000DBT to model do **profesjonalnego stosowania w gabinetach kosmetyologii, fizjoterapii i masażu**. Jest to jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń do drenażu limfatycznego dostępnych na rynku. Dzięki wbudowanym kółkom, przestawienie urządzenia staje się łatwe, a ergonomicznie zaprojektowany uchwyt sprawia, że korzystanie z niego w gabinetach jest niezwykle wygodne i proste. PRESSMATIC PM-20000DBT jest najbardziej kompleksowym rozwiązaniem dla wszystkich chcących zadbać o swoje ciało, zarówno z zewnątrz (sylwetka, skóra), jak i wewnątrz (oczyszczanie z toksyn, poprawa krążenia). Dzięki różnym programom, umożliwia wykonanie nie tylko delikatnego zabiegu drenażu limfatycznego, ale też głębokiego masażu wpływającego na mięśnie. Dodatkowo **termoterapia FIR** poprawia krążenie krwi i rozluźnia mięśnie, a także przyspiesza pozbycie się zbędnej tkanki tłuszczowej. Z kolei **elektrostymulacja EMS** pomaga w treningu mięśni i ujędrnia skórę, a także spala kalorie.

Opis

MATA NA ŁÓŻKO

Do zestawu dołączona jest specjalna mata na łóżko, w której ukryte są wszystkie przewody, a dzięki pojemnym kieszeniom można w niej schować również mankiety i elektrody. **Mata zapewnia wysoki komfort stosowania** w profesjonalnym gabinecie, ponieważ dzięki niej, mankiety i elektrody nie wymagają dodatkowego miejsca do przechowywania. Stanowisko do

PRESSMATIC®

presoterapii jest zawsze gotowe, a po ukryciu mankietów w kieszeniach, można na nim wykonywać pozostałe zabiegi.



Opis

PROGRAMY PRESOTERAPII

A FALA - tzw. masaż wstępujący, w którym komory pompowane są od dołu do góry. Jest to łagodna wersja drenażu limfatycznego dla osób wrażliwych. Zaleca się wykonanie pierwszego testowego zabiegu z użyciem programu A w celu przyzwyczajenia organizmu do zabiegów presoterapii. Najpierw napełnia się komora na samym dole, następnie opróżnia się, a napełnia się kolejna. Kiedy napełni się i opróżni ostatnia komora, cykl się powtarza. **B FALA II** - to bardziej intensywna wersja masażu wstępującego. Z uwagi na łagodzenie bólu i rozluźnianie spiętych mięśni, program ten doskonale sprawdza się w rehabilitacji sportowców, osób cierpiących z powodu spastyczności mięśni lub zespołu niespokojnych nóg. Przynosi ulgę osobom pracującym w siedzącej pozycji. Komory napełniają się kolejno od najniższej w górę, po napełnieniu pierwszej komory pozostaje ona napompowana do momentu pełnego napełnienia drugiej, w momencie napełniania się trzeciej pierwsza zostaje opróżniona, druga nadal pozostaje napompowana itd. Kiedy napełnią się i opróżnią ostatnie komory cykl się powtarza. **C DRENAŻ LIMFATYCZNY** - intensywny masaż przepychający limfę w kierunku węzłów chłonnych, zapobiegając jej cofaniu. Zalecany u osób cierpiących z powodu obrzęku limfatycznego i/lub lipidowego (lipoedemy). Przeznaczony jest dla osób, które dobrze reagują na intensywne zabiegi presoterapii. Pompowane są kolejne komory zaczynając od najniższej w górę, każda komora pozostaje napełniona, aż do napełnienia się ostatniej, po czym wszystkie jednocześnie opróżniają i cykl się powtarza. **D**

PRESSMATIC®

DETOKSYKACJA - zabieg bardzo intensywny, polega na napełnianiu się wszystkich komórek. Doskonale sprawdza się jako regeneracja po treningu fizycznym, łagodzi zakwasy. Usuwa nadmiar wody z tkanek, dzięki czemu wspomaga odchudzanie i walkę z cellulitem. **E STOPY** - program, w którym pompują się jednocześnie komory nr 1 i 2, czyli mankiety obejmujące stopy i kostki. Polecany po długim staniu lub siedzeniu oraz dla osób z tendencją do puchnięcia stóp. **F ŁYDKI I UDA** - program, w którym pompują się jednocześnie komory nr 3, 4, 5 i 6, czyli mankiety obejmujące łydki i uda. Pomaga zmniejszyć uczucie ciężkości nóg oraz napięcie mięśni. **G TUŁÓW** - program, w którym pompują się jednocześnie komory nr 7 i 8, czyli mankiety obejmujące tułów. **H RĘCE** - program, w którym pompują się jednocześnie komory nr 9 i 10, czyli mankiety obejmujące kończyny górne.

Opis

TERMOTERAPIA FIR

Urządzenie do drenażu limfatycznego PRESSMATIC PM-20000DBT posiada funkcję termoterapii FIR, czyli **podgrzewania tkanek** w każdym z mankietów. Jest to zabieg z użyciem światła podczerwonego, które kumuluje energię w tkankach głębszych, takich jak skóra właściwa, tkanka tłuszczowa i mięśnie, zwiększając ich temperaturę, jednocześnie powodując tylko nieznaczne podgrzanie naskórka. Termoterapia FIR rozszerza naczynia krwionośne, dzięki czemu przyspiesza metabolizm, a tym samym wzmacnia dotlenienie i odżywienie komórek. Pod wpływem delikatnego podwyższenia temperatury w skórze właściwej, dochodzi do tzw. **termoliftingu**, czyli skracania włókien kolagenowych. Skóra staje się bardziej gęsta, napięta i odmłodzona. Oprócz efektów kosmetycznych, termoterapia doskonale sprawdza się w celu pobudzenia krążenia krwi i rozluźnienia mięśni.

Opis

ELEKTROSTYMULACJA EMS

EMS (elektryczna stymulacja mięśni) to metoda wywoływania skurczu mięśni za pomocą impulsów elektrycznych o precyzyjnie dobranych parametrach. Urządzenie PRESSMATIC PM-20000DBT generuje **impulsy naśladujące naturalny potencjał czynnościowy pochodzący z ośrodkowego układu nerwowego**. Dzięki odpowiednio rozmieszczonym elektrodom są one przekazywane bezpośrednio do mięśni. W efekcie nerwy ruchowe zostają pobudzone, a mięśnie wykonują pracę porównywalną z naturalną aktywnością podczas wysiłku fizycznego.

Opis

PRESSMATIC®

PROGRAMY ELEKTROSTYMULACJI

A DETOKSYKACJA – impulsy elektryczne o częstotliwości 10Hz, wywołujące silne i długie skurcze mięśni. Program ma na celu oczyszczenie i relaksację mięśni, poprawia cyrkulację krwi i wspomaga usuwanie końcowych produktów metabolizmu. **B TRENING** – impulsy elektryczne o częstotliwości 20Hz wywołujące skurcze mięśni średniej mocy i długości. Program ma na celu wzmacnianie mięśni i spalanie tkanki tłuszczowej. **C TRENING II** – impulsy elektryczne o częstotliwości 30Hz wywołujące delikatne i krótkie skurcze mięśni. Program ma działanie wzmacniające mięśnie i spalające tkankę tłuszczową. Przeznaczony jest dla osób wrażliwych. **D UJĘDRNIANIE** - impulsy elektryczne o częstotliwości 40Hz podawane są bez przerwy, dzięki czemu mięśnie utrzymują się w ciągłym skurczu. Program wpływa na odpowiednie napięcie skóry i działa antycellulitowo.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Układ sterowania ciśnieniem	cyfrowy
Ilość obsługiwanych komór w mankietach	20
Waga urządzenia	19,4 kg
Przeznaczenie	dla fizjoterapeuty, dla kosmetologa
Ilość programów ucisku	8
Maksymalne ciśnienie	294 mmHg
Funkcja FIR	✓
Funkcja EMS	✓
Wymiary urządzenia	38 x 38 x 97 cm